

	Mode Opérateur	
	PO05-MO0002 Mode opératoire de prélèvement	I.E. :3

Détails du document		
Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Actes

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	11/06/2019	Création
2	12/08/2020	Modification
3	25/08/2021	Modification

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Fatou NDIAYE	Technicienne Laboratoire		25/08/2021	16:43:35
Théodore Konan	Responsable Opérationnel et Qualité		23/08/2021	09:48:33

Liste des vérificateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		25/08/2021	17:35:05

Liste des approbateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		25/08/2021	17:35:11

Objet du mode opératoire

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions relatives au prélèvement du matériel biologique pour analyse.

Domaine d'application

Ce mode opératoire s'applique à l'ensemble des personnes responsables du prélèvement du matériel biologique.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de cette procédure.

Référence

Norme ISO 9001 V 2015

Description du mode opératoire

Le garrot posé pour permettre la pénétration de l'aiguille doit être enlevé avant de commencer le prélèvement mais la levée de garrot n'est pas systématique.

NB : Pour le bilan de l'hémostase (tube Citraté) le garrot doit-être obligatoirement enlever avant de commencer le prélèvement.

Le sang prélevé doit être mis au frais (entre 2°C et 6°C) immédiatement après le prélèvement. À température ambiante la durée de conservation maximale est de 30 minutes.

Dénomination des tubes

Tube sec	Tube Citraté	Tube Hépariné	Tube EDTA	Tube Fluoré
				
- Biochimie - Sérologie - Hormonologie - Electrophorèse des protéines - Immunoélectrophorèse - Troponine - Marqueurs tumoraux	- TP-TCA - Fibrinogène - D Dimère - Autres paramètres de l'hémostase - NFS	- Biochimie - T E - Electrophorèse hémoglobine - HbA1C	- NFS - GS-RH - GE-QBC - VS - TE - Electrophorèse hémoglobine - RAI - HbA1C	Glycémie (prélèvement extérieur)

Ecouvillon 	Pot ECBU 	Pot KOP + Coproculture 
• PUS • Prélèvement vaginal • Prélèvement urétral • Prélèvement mycologie • Prélèvement gorge	• E C B U • Protéinurie (échantillon) • Glucosurie (échantillon)	• KOP • Coproculture

Choix des tubes et ordre des prélèvements

Tube sec	 Bouchon rouge
Tube Citraté	 Bouchon bleu
Tube Hépariné	 Bouchon vert
Tube EDTA	 Bouchon violet
Tube Fluoré	 Bouchon gris