

	Mode Opérateur	
	PS01-MO0006	I.E. :1
	Mode opératoire de remplacement des bouteilles	

Détails du document			
Mat. Superviseur	Superviseur	Site	Activité
000031	Lauriane Marie LE FLOUR		Gestion des stocks, approvisionnements et achats

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	26/04/2019	Création

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Mbenda MBODJI	Chargée des Approvisionnements, Achats et Services Généraux ((CAASG		26/04/2019	00:00:00

Liste des vérificateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage-femme		26/04/2019	00:00:00

Liste des approbateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		26/04/2019	00:00:00

	Procédure Remplacement des bouteilles d'oxygène	Page : 1
---	---	-----------------

Objet du mode opératoire

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions relatives au remplacement des bouteilles d'oxygène.

Domaine d'application

Ce mode opératoire s'applique à l'ensemble des personnes responsables du changement des bouteilles d'oxygène (médecin-chef et infirmiers de bloc).

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de cette procédure.

Référence

Norme ISO 9001 V 2015

Description du mode opératoire

Fonctionnement du mode opératoire

Un tableau magnétique est fixé dans le local à bouteilles d'oxygène. Les différentes étapes du changement des bouteilles y sont décrites sous forme de schémas. Un aimant est placé sous l'étape en cours et doit être déplacé à chaque changement d'étape.

La commande se fait une fois qu'il y a deux bouteilles vides dans le stock des bouteilles vides.


Contrôle des bouteilles vides

Contrôle quotidien du nombre de bouteille par Coly

Etapas de changement des bouteilles

Etape 1, après livraison :


Après la livraison les deux bouteilles du stock sont pleines

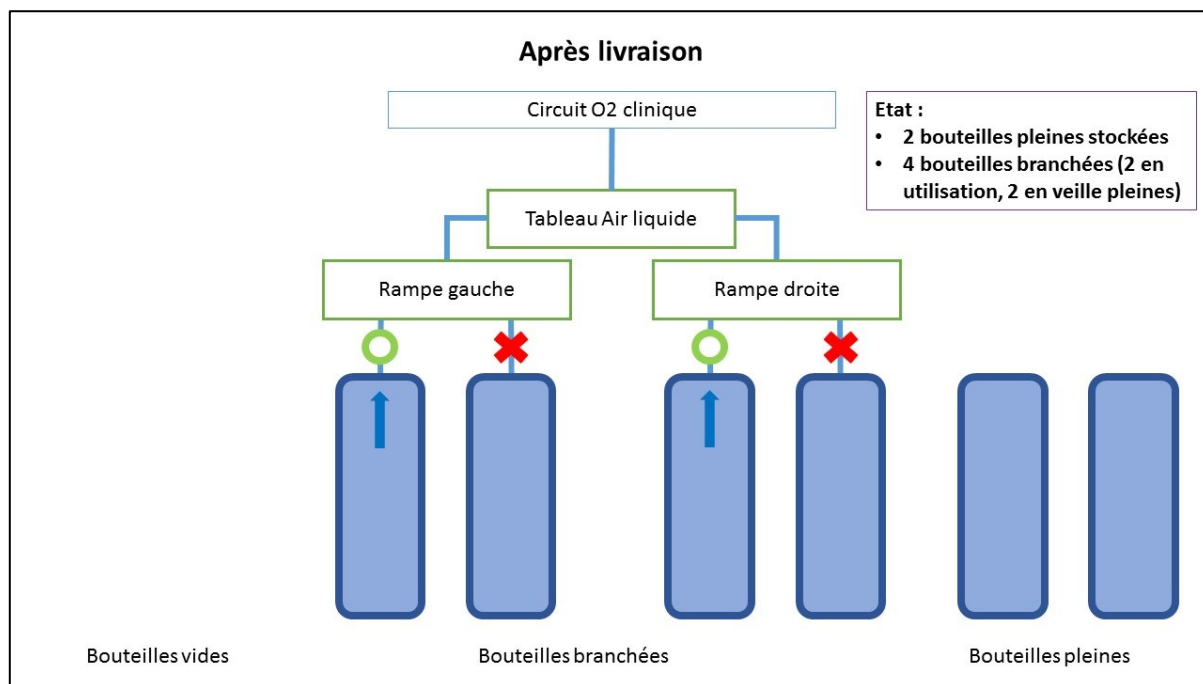

Etape 2, alarme 1^{ère} bouteille vide :

Lors du retentissement de l'alarme, on ferme la vanne de la bouteille vide et on ouvre celle de la bouteille pleine de la même rampe.


On passe à l'étape 3 le plus rapidement possible.

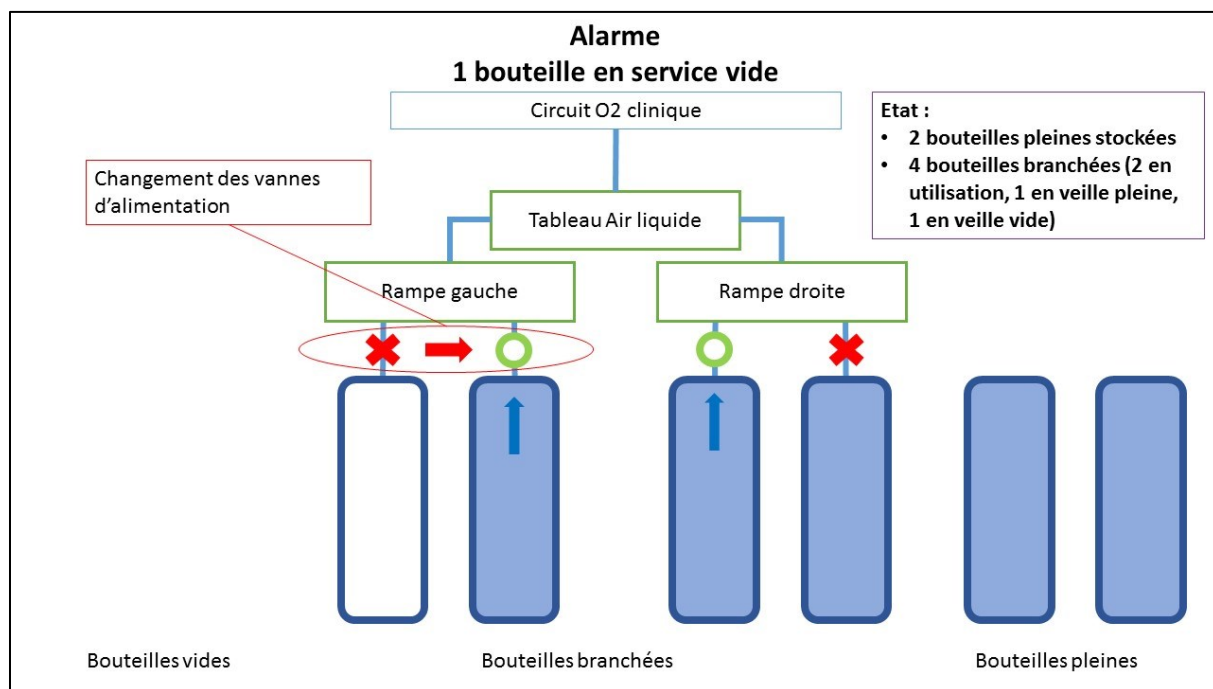

Etape 3, remplacement 1^{ère} bouteille :

Après la mise hors service de la bouteille vide, elle est placée dans le stock des bouteilles vides et une bouteille pleine la remplace sur la rampe.


Il y a alors 1 bouteille dans le stock des bouteilles pleines et 1 bouteille dans le stock des bouteilles vides

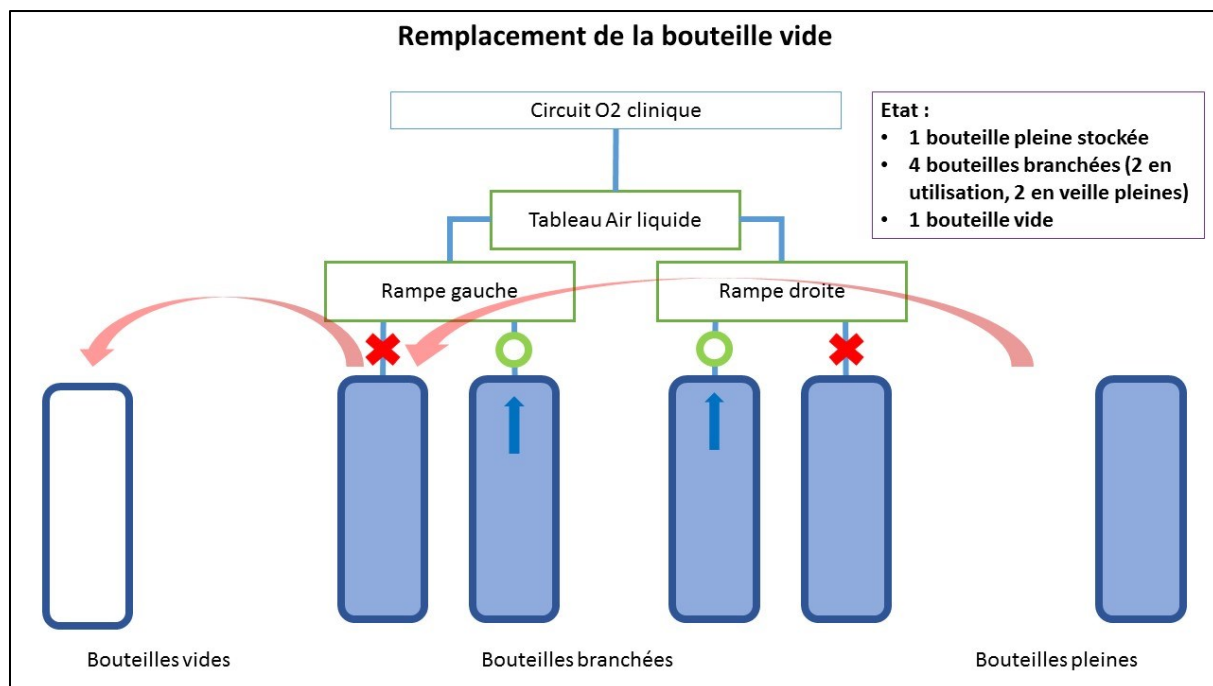

Etape 4, alarme 2^{ème} bouteille vide :

Lors du retentissement de l'alarme, on ferme la vanne de la bouteille vide et on ouvre celle de la bouteille pleine de la même rampe.

On passe à l'étape 5 le plus rapidement possible.

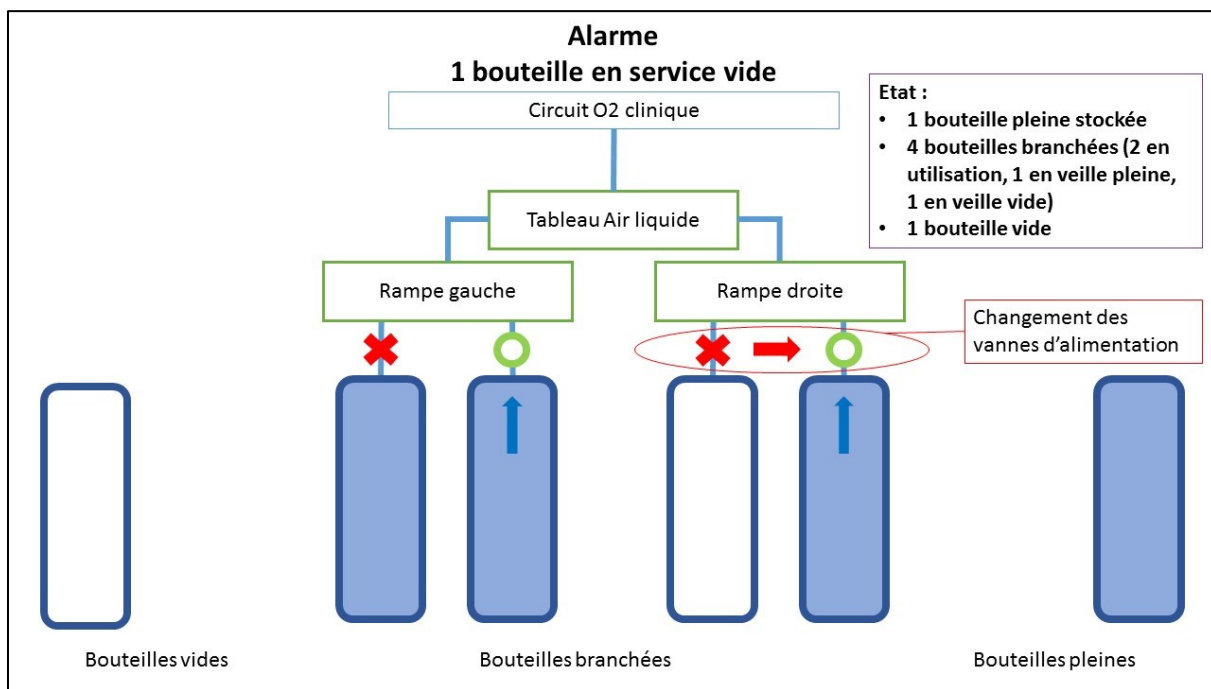

Etape 5, Remplacement 2^{ème} bouteille :

Après la mise hors service de la bouteille vide, elle est placée dans le stock des bouteilles vides et une bouteille pleine la remplace sur la rampe.

Il y a alors 2 bouteilles dans le stock des bouteilles pleines, la chargée des approvisionnements et achats est prévenue de la nécessité de commander le remplacement des bouteilles vides du stock.

Remplacement de la bouteille vide

