

	Procédure	
	PO05-PR0002	I.E. :1
	Procédure de gestion des analyses	

Détails du document			
Mat. Superviseur	Superviseur	Site	Activité
000031	Lauriane Marie LE FLOUR		Actes

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	07/06/2019	Création

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Fatou NDIAYE	Technicienne Laboratoire		18/06/2020	13:25:58
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage-femme		16/06/2020	16:25:56

Liste des vérificateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Soukeyna Maimouna Sarr	Chef de Projet Qualité		06/07/2020	16:22:14

Liste des approbateurs				
Nom\prénom	Fonction	Signature	Date de validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		07/07/2020	08:29:54

Objet de la procédure

Cette procédure a pour objet de décrire les dispositions de prélèvement, de transport et d'analyse du sang et du matériel biologique.

Domaine d'application

Cette présente procédure s'applique à l'ensemble du personnel médical habilité à réaliser des prélèvements ou à les analyser.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application et du respect de cette procédure.

Référence

Norme ISO 9001 V 2015

Annexes

Canevas de résultat du laboratoire

Mode opératoire de prélèvement

Bulletins d'analyse

Analyse_nest

Description de la procédure

Prélèvement

Le prélèvement peut être effectué dans les deux sites opérés par NEST. Les personnes ayant la possibilité de prélever le matériel biologique sont :

- Les médecins
- Les sages-femmes / maïeuticiens
- Les infirmiers(ières)
- Les techniciens(nes) de laboratoire

Les prélèvements effectués au plateau médical sont effectués le matin, avant le passage du coursier.

Chaque prélèvement doit être accompagné d'un bulletin d'analyse et être facturé sur Eyone.

Le sang prélevé doit être mis au frais (entre 2°C et 6°C) immédiatement après le prélèvement. À température ambiante la durée de conservation maximale est de 30 minutes.

Conservation et transport

Le sang total doit être conservé à une température comprise entre 2°C et 6°C à cette température la durée de conservation maximale est de 24h.

Le transport entre deux sites s'effectue avec une glacière munie de pains de glace spécifiques. La durée du transport ne doit pas excéder 4h, à l'arrivée le sang doit être frais. Les tubes doivent rester stables pendant le transport.

Analyse

La liste des analyses proposées à la patientèle est disponible dans Eyone. Les analyses pouvant être effectuées en interne sont répertoriées dans le fichier *analyse_nest*.

Le bulletin d'analyse est systématiquement transmis avec les échantillons d'analyse. Les analyses à effectuer sont celles facturées dans Eyone.

Les résultats des analyses internes sont transmis en utilisant les canevas de résultats du laboratoire.