

	Support Informant	
	PS06-SI0014 Affiche - Utilisation du stérilisateur à la clinique	I.E. :1

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	nonaffecte

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	22/11/2019	Création

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Astou NDAW	Ass/Infirmière		25/11/2020	16:57:04

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage-femme		26/11/2020	11:15:13

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		26/11/2020	12:10:31

Utilisation du stérilisateur

Le stérilisateur ne doit être utilisé que sur le matériel médical déjà **nettoyé et décontaminé**.

Les instruments en plastique, en caoutchouc ou en verre avec un pas de vis (flacons) ne doivent pas être placés au stérilisateur.

La stérilisation dure 30 minutes à 180°C, 2 heures à 160°C, 3 heures à 140°C.

- Ne pas surcharger les étagères du stérilisateur
- Fermer la porte du stérilisateur et placer le loquet en position « Closed » (à droite)
- Allumer le stérilisateur (bouton switch) ; la lumière orange doit s'allumer
- A la fin du temps de stérilisation, vérifier que le stérilisateur est éteint.

140°C	3h15
-------	------