

	Support Informant	
	PS06-SI0013 Affiche - Utilisation du stérilisateur	I.E. :1

Détails du document		
Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Maîtrise de l'environnement des soins

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	14/06/2018	Création

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Astou NDAW	Ass/Infirmière		25/11/2020	16:56:35

Liste des vérificateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage-femme		26/11/2020	11:18:38

Liste des approbateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		26/11/2020	12:10:09

Utilisation du stérilisateur

Le stérilisateur ne doit être utilisé que sur le matériel médical déjà **nettoyé et décontaminé**.

Les instruments en plastique, en caoutchouc ou en verre avec un pas de vis (flacons) ne doivent pas être placés au stérilisateur.

La stérilisation dure 30 minutes à 180°C, 2 heures à 160°C, 3 heures à 140°C.

- Ne pas surcharger les étagères du stérilisateur
- Fermer la porte du stérilisateur et placer le loquet en position « Closed » (à droite)
- Allumer le stérilisateur (bouton switch) ; la lumière orange doit s'allumer
- Tourner la molette du thermostat au maximum
- Mettre un minuteur sur **3h15** : 15 minutes de montée en température, 3h de stérilisation
- A la fin du temps de stérilisation, vérifier que le stérilisateur est éteint.

140°C	3h15
--------------	-------------